

PIL-BOB: MEDIKAMENTE AUS BLISTERKARTEN ENTNEHMEN

Der Pil-Bob ist ein Hilfsmittel zur Entnahme der Medikamente aus der fertiggestellten Blisterkarte. Die Tabletten aus einer Einzeldosierung fallen in den kleinen Behälter und können hygienisch verabreicht werden, ohne dass ein Kontakt mit den Medikamenten erfolgt.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Zu entnehmenden Einnahmezeitpunkt auf der Rückseite der Blisterkarte heraussuchen. Mit der „Nase“ des Pil-Bob in den gewählten Einnahmezeitpunkt einstecken und die Karte wieder umdrehen, so dass die Tabletten hineinfallen können.
2. Mit dem Pil-Bob einmal um den inneren Rand des Einnahmezeitpunktes fahren, damit die Aluminiumfolie den Einnahmezeitpunkt komplett frei gibt. Die Tabletten fallen nun in den Pil-Bob.
3. Die Tabletten können nun dem Patienten direkt in die Hand oder in eine Einnahmehilfe übergeben werden, ohne dass ein Medikamenten-Kontakt entsteht.
4. Der Pil-Bob ist spülmaschinenfest und kann somit leicht gereinigt werden.

Der Pil-Bob – hygienisch, sicher und clever

